

SKU: 1-59909
EAN: 4260301059909

myPAD Ersatzelektroden für Erwachsene und Kinder

Zuverlässige Verbindung für eine effektive Defibrillation

Sorge dafür, dass Dein HeartSave myPAD jederzeit einsatzbereit ist – mit unseren hochwertigen Elektroden, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet sind. Sie wurden speziell für eine einfache Handhabung und präzise Anwendung in Notfallsituationen entwickelt.

Herausragende Merkmale

- **Latexfrei:** Sicher für empfindliche Haut und Allergiker.
- **Einfache Anwendung:** Deutliche Piktogramme helfen Dir bei der korrekten Platzierung der Elektroden.
- **Haltbarkeit:** Nach dem Öffnen bis zu **24 Stunden** verwendbar.
- **Effektive Defibrillation:** Ein Satz Elektroden ermöglicht bis zu **50 Defibrillationsschocks**.

Sicherheitshinweise

- Verwende die Elektroden nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Falte oder biege die Elektroden nicht.
- Stelle vor der Anwendung sicher, dass die Brust des Patienten **trocken** ist und überschüssige Brusthaare entfernt wurden.

Aufbewahrungshinweis

Bewahre die Elektroden immer in der Nähe des Defibrillators auf, damit Du im Notfall sofort darauf zugreifen kannst. Für Kinder ist es wichtig, die Elektroden in **anterior-posteriorer Position** anzubringen.

Extratipp

Halte stets Ersatz-Elektroden bereit – besonders, wenn Du den Defibrillator regelmäßig nutzt oder die Elektroden das Verfallsdatum erreicht haben.