


Inhaltsübersicht

WAS IST EIN SIXCASE?	3
ZU IHRER SICHERHEIT	3
KONVENTIONEN	3
WICHTIG	3
GARANTIE	4
PRODUKTÜBERSICHT	5
WAS ENTHÄLT DAS SIXCASE?	5
ÜBERSICHT SC1310 (INNENBEREICH)	6
ÜBERSICHT SC1330/SC1430	6
ÜBERSICHT SC1340/SC1440	8
WICHTIG	9
AUFHÄNGUNG AUF STEIN ODER BETON	9
STROMVERSORGUNG UND KABEL	9
WARNUNG	10
AUFHÄNGUNG AN HOLZ	10
OPERATION	10
IM NOTFALL (VERWENDUNG AED)	10
EINSTELLEN DER DAUER DES ALARMS	10
WICHTIG	10
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	11
WARTUNG	11
TEMPERATUR (NUR FÜR AUßENSCHRÄNKE)	11
AUSWECHSELN DES NOTGLASES (SC1310/ 1330/ 1430)	11
ÄNDERN DES CODES (SC1340/SC1440)	12
FEHLERSUCHE	13
GLOSSAR	16
ANHANG A: TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	17

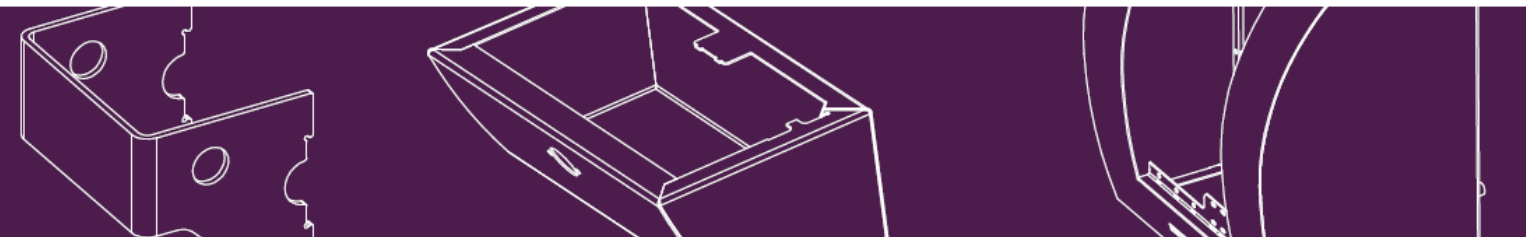

Was ist ein SixCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges Gerät für die Erstversorgung im Falle eines Herzstillstands. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der AED geschützt, gesichert und rund um die Uhr für sofortige Hilfe im Notfall verfügbar ist. Unser SixCase-Schrank bietet den ultimativen Schutz und sorgt dafür, dass der AED Tag und Nacht verfügbar ist.


Der SixCase-Schrank für den Außenbereich ist in Edelstahl oder leichtem Aluminium erhältlich und wurde entwickelt, um den AED vor extremen Wetterbedingungen zu schützen. Der Schrank ist wasser- und gewaltbeständig und verbindet ein bewährtes Konzept mit einem modernen Design. Ein Polycarbonat-Fenster ermöglicht eine klare Sicht auf den AED. Zwei hydraulische Klappen öffnen den unteren Teil der AED-Halterung nach Drücken des roten Knopfes oder nach Eingabe eines 4-stelligen Codes (je nach Schranktyp). Um die Temperatur über 0°C zu halten, ist das SixCase im Außenbereich mit einem Temperatursensor und einer Heizung ausgestattet. Außerdem wird der AED durch eine aktive Belüftung vor Überhitzung geschützt.

Zu Ihrer Sicherheit

Konventionen Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Installateure und Betreiber sollten diese Sicherheitserwägungen und Anweisungen durchlesen, bevor sie den SixCase AED-Schrank in Betrieb nehmen. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.


		Symbol
Warnung:	Warnhinweise machen Sie auf Bedingungen oder Handlungen aufmerksam, die eine Gefahr darstellen können.	

Wichtig SixCase behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle damit verbundenen Produkte in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern. Der Inhalt dieses Dokuments wird ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt.

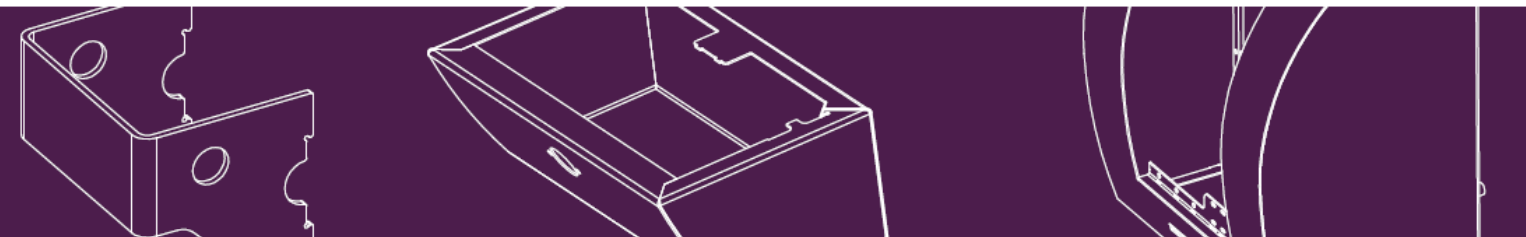

Garantie

1. GT MEDICARE bürgt für die Qualität der von ihr nach bestem Wissen und Gewissen erbrachten Leistungen sowie für die Solidität und gute Qualität der von ihr gelieferten Produkte. Die Garantie geht nicht über die im Folgenden genannten Bestimmungen hinaus.
2. Die Garantie basiert auf dem Versand und der Rücksendung. Wird dieser Service in Anspruch genommen, muss der Käufer für die korrekte Verpackung des Produkts sorgen, so dass Transportschäden vermieden werden. Wenn die Defekte durch den Käufer verursacht wurden, gehen die Reparatur- und Versandkosten zu Lasten des Käufers.
3. Der Käufer kann sich nicht auf die Garantiebestimmungen berufen:
 - A: Wenn der Käufer die Produkte vernachlässigt hat.
 - B: Wenn der Käufer Änderungen an den Produkten vorgenommen hat oder hat vornehmen lassen, einschließlich Reparaturen, die nicht von oder im Auftrag von GT MEDICARE durchgeführt wurden.
 - C: Bei unsachgemäßem oder nachlässigem Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Spannung, Blitzschlag, Schäden durch Feuchtigkeit oder andere externe Produkte oder Katastrophen.
 - D: Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gewartet wird.
 - E: Wenn das Gerät mit nicht-originalem oder minderwertigem Zubehör verwendet oder installiert wird.
 - F: Wenn der Käufer die Produkte nachlässig behandelt hat.
4. GT MEDICARE garantiert, dass die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung keine schwerwiegenden Mängel aufweisen.
5. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, GT MEDICARE innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Produkte beim Wiederverkäufer schriftlich über Mängel, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte zu informieren, die bei einer Inspektion der Produkte festgestellt werden können. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, GT MEDICARE alle anderen Beanstandungen innerhalb von 1 Jahr nach dem Lieferdatum schriftlich mitzuteilen. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, GT MEDICARE auf Verlangen und auf Kosten von GT MEDICARE alle Produkte, von denen er behauptet, sie seien nicht konform oder beschädigt, unverzüglich zur Überprüfung durch GT MEDICARE zurückzusenden. GT MEDICARE akzeptiert keine Reklamationen, die nicht in Übereinstimmung mit den in diesem Absatz genannten Anforderungen und innerhalb der dort genannten Fristen eingereicht werden. Falls GT MEDICARE für die Nichtkonformität oder Beschädigung des Produkts verantwortlich ist, repariert GT MEDICARE nach eigenem Ermessen die Produkte, ersetzt sie durch neue Produkte oder erstattet dem Wiederverkäufer den Kaufpreis für die Produkte. GT MEDICARE hat gegenüber dem Wiederverkäufer keine anderen Verpflichtungen oder Haftungen in Bezug auf nicht konforme oder beschädigte Produkte als die im vorstehenden Satz genannten.
6. Die Dauer der Garantie auf die GT MEDICARE Geräte beträgt 24 Monate. Kratzer, Beschädigungen und Abnutzung sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung. Der Hersteller ist nur verpflichtet, die sich aus diesen Garantiebestimmungen ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn eine Reklamation auf eine Änderung oder unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückgeführt werden kann, erlischt die Garantie unter allen Umständen.
8. Der Empfänger wird alle erhaltenen Geräte unverzüglich untersuchen. Der Kunde muss GT MEDICARE innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt der Sendung schriftlich über etwaige Mängel informieren. Werden die Mängel nicht innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen gemeldet, gilt die Sendung als

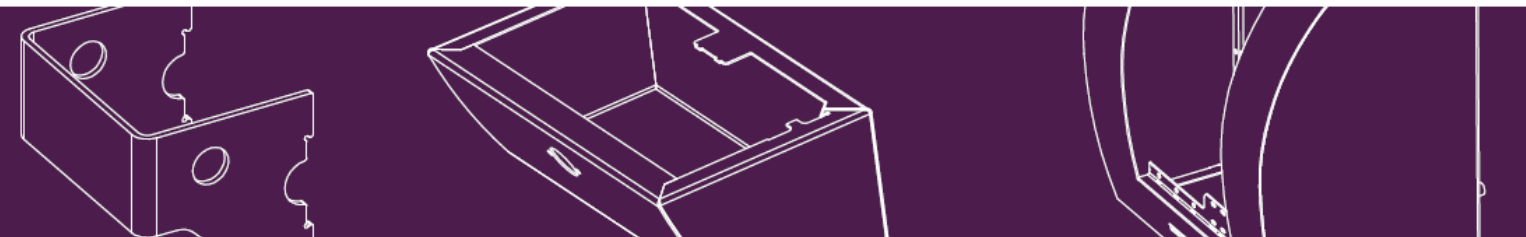

vollständig. Reklamationen sind nur innerhalb der Gewährleistungsfrist möglich. Wird eine Reklamation von GT MEDICARE anerkannt, so ist GT MEDICARE nur zum Ersatz der mangelhaften Ware oder zur Reparatur verpflichtet, ohne dass der Kunde Anspruch auf irgendeinen Schadenersatz hat. Die Einreichung einer Reklamation entbindet den Kunden nicht von der Zahlung.

Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie ein SixCase gekauft haben.

Was enthält das SixCase? Das SixCase besteht aus den folgenden Teilen:

- SixCase AED-Wandkabinett
- Schlüssel (nur für SC1340/SC1440)
- 9V-Batterie (nur für 1310)
- 24V Adapter*
- Kurzanleitung zur Installation
- Installationsmaterial

Vorinstalliert:

- Netzkabel 3m (vorinstalliert)*
- Heizgerät*
- Ventilator für aktive Belüftung*
- LED-Beleuchtung*
- Alarm, wenn der Schrank geöffnet wird

** nicht inbegriffen für Innenschrank 1310*

Installationsmaterial:



Unterlegscheiben (4x)

M8-Muttern (4x)

Nylon-Abstandshalter (4x)

Wanddübel (4x)

Dübelschraube (4x)

SixCase SC1340/SC1440 (Pincode-Version)

- Tasten

Die SC 1340/SC1440 sind mit einem mechanischen Sicherheitsschloss ausgestattet. Für dieses Sicherheitsschloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert.




SixCase SC1340M (Pincode-Version mit mechanischem Codeschloss)

- Schlüssel

Der SC 1340M ist mit einem 4-stelligen mechanischen Codeschloss zur Sicherung ausgestattet. Ein Schlüssel für dieses Sicherungsschloss ist im Lieferumfang enthalten.



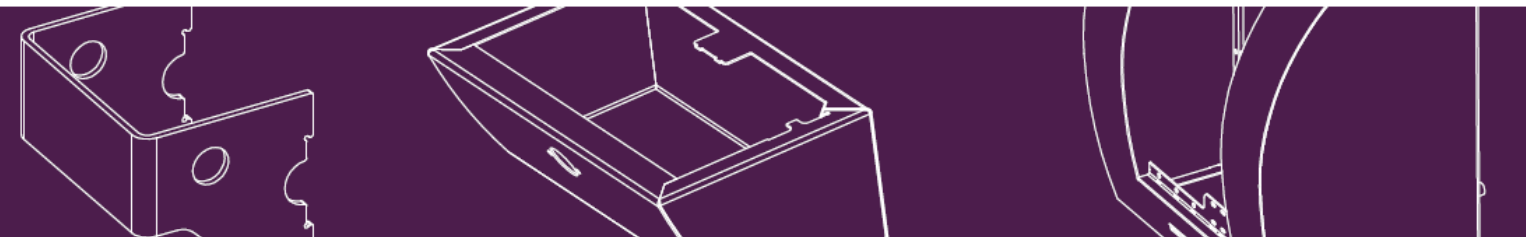


Übersicht SC1310 (Innenbereich)




Ansicht von innen nach oben: Steuereinheit


Schrauben zur
Befestigung der
Steuereinheit

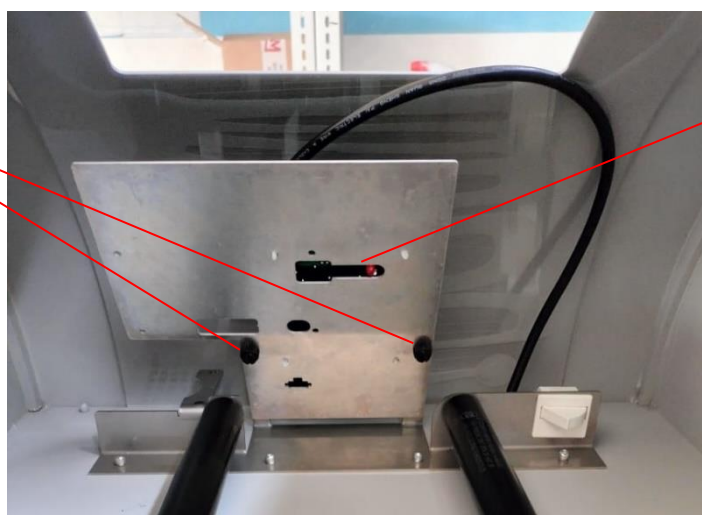

LED-Leuchten

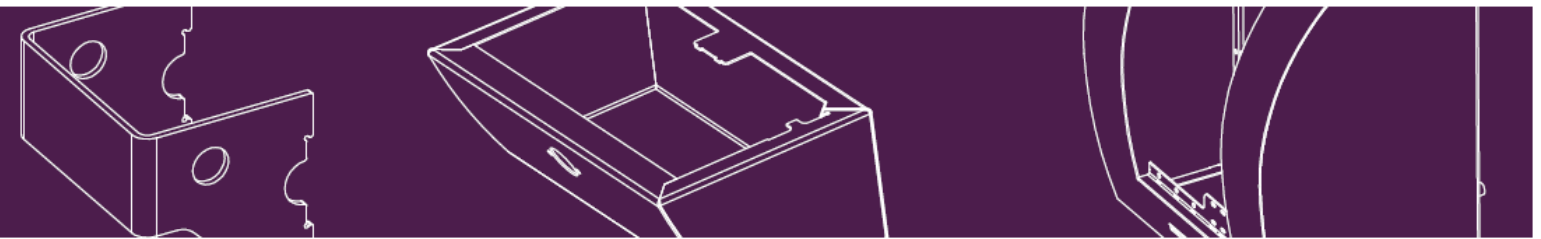

Übersicht SC1330/SC1430

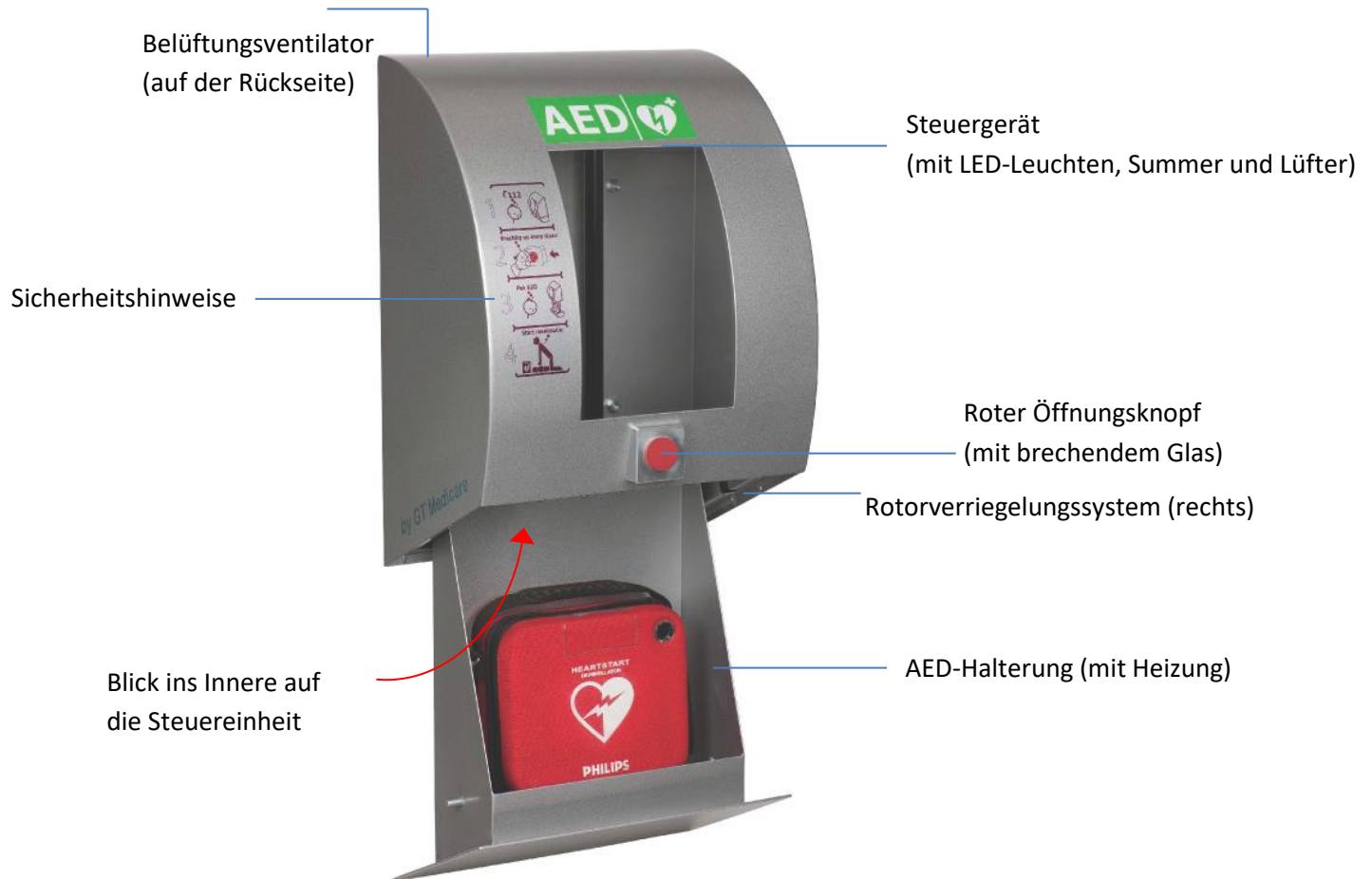


Ansicht von innen nach oben: Steuereinheit

Schrauben zur
Befestigung der
Steuereinheit

Schrauben zur
Befestigung des
Ventilators


Fan

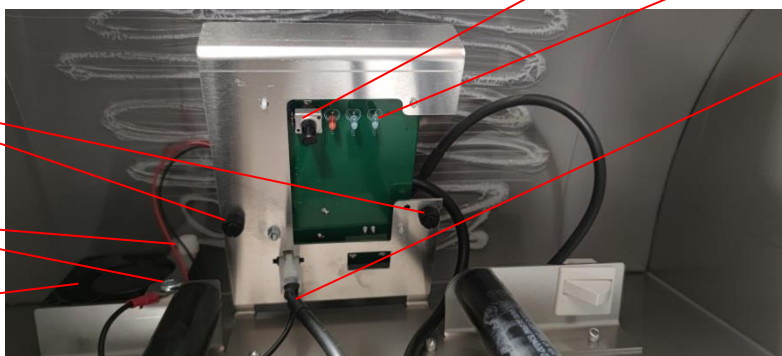

Drehknopf

LED-Leuchten


Stromkabel

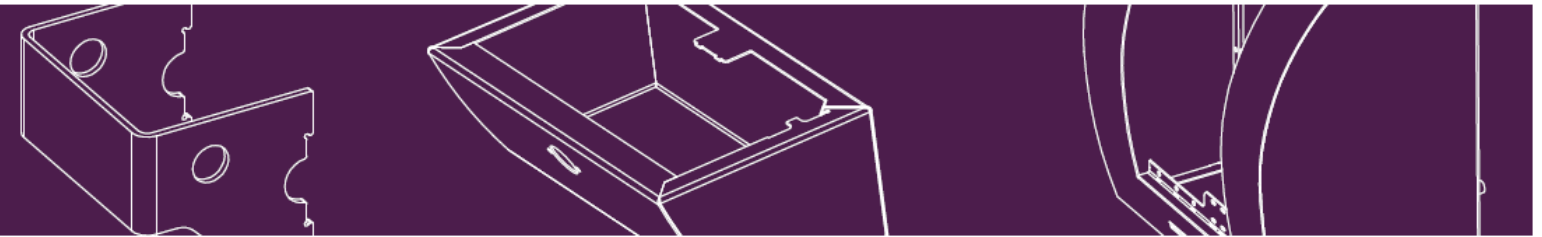


Übersicht SC1340/SC1440



Ansicht von innen nach oben: Steuereinheit

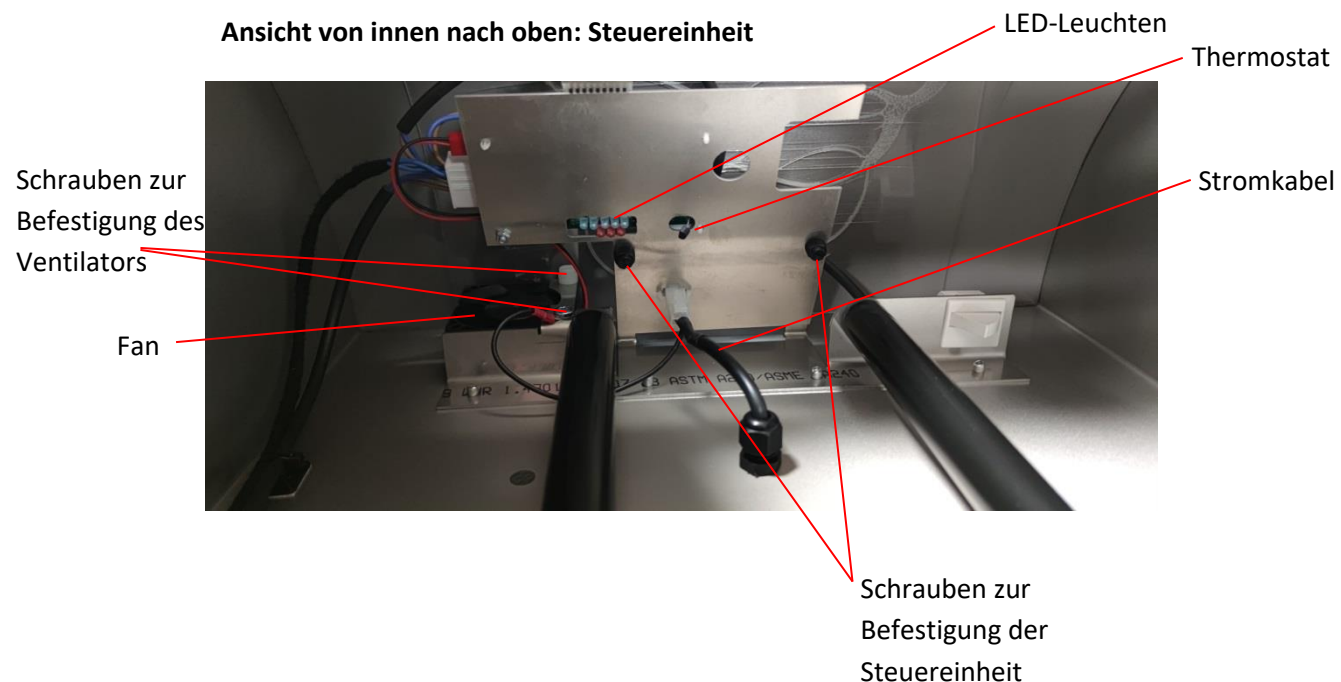

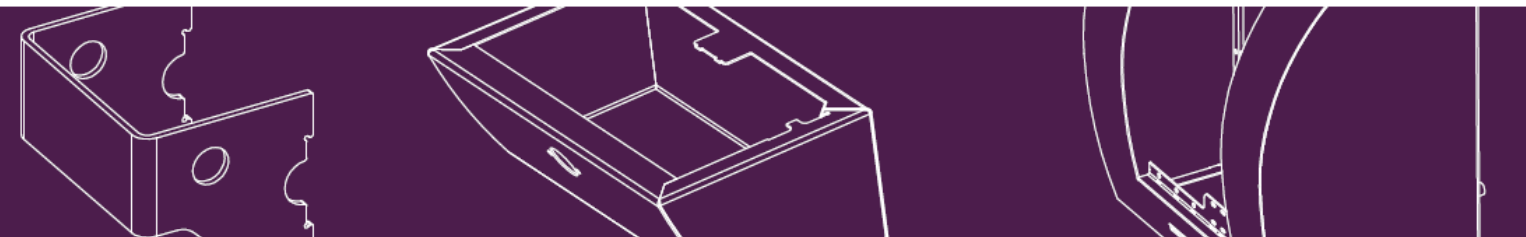


Wichtig Das mitgelieferte Montagematerial ist nur für die Aufhängung auf einer ebenen Fläche aus Holz, (Ziegel-)Stein oder Beton vorgesehen. Die Paneele sollten eine Mindestdicke von 3 mm haben. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter. Wir empfehlen, den Schrank im Schatten aufzuhängen, um hohe Temperaturen im Inneren des Schrankes zu vermeiden.

Aufhängung auf Stein oder Beton Bohren Sie 4 Löcher im Abstand von 180 mm x 250 mm (siehe Abbildung). Bohren Sie die 10-mm-Löcher mit einer Mindestdiefe von 60 mm, um eine ausreichende Tiefe für die Dübel zu gewährleisten. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe zwischen 1,5 und 1,6 m über dem Boden zu bohren. Die Löcher sollten immer in der Mitte des (Ziegel-)Steins gebohrt werden. Schrauben Sie die M8-Stiftschrauben in die Dübel, bis sie **20-25 mm** aus der Wand herausragen, und schieben Sie die Nylon-Abstandshalter über die Stiftschrauben. Stecken Sie nun das Stromkabel ein, bevor Sie den Schrank an die Wand hängen.




1: Einsetzen der Dübel und

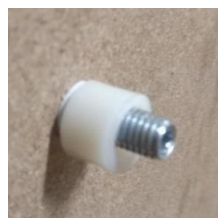


2: Platzieren Sie die Abstandshalter

Stromversorgung und Kabel GT MEDICARE empfiehlt, ein 12-mm-Loch zu bohren, durch das das Stromkabel durch die Wand verlegt werden kann. Dieses kann dann an den 24V-Adapter angeschlossen werden, der im Inneren des Hauses oder Gebäudes platziert werden sollte. Es ist wichtig, das Stromkabel durch die Wand zu führen, bevor der Schrank an die Wand gehängt wird. Das Stromkabel ist bereits an der Innenseite des SixCase angebracht (vorinstalliert). Führen Sie das Kabel von außen nach innen und ziehen Sie es dann von innen weiter nach innen. Das SixCase ist nun bereit, an die Wand gehängt zu werden. Nachdem Sie die Stockschrauben angebracht haben, können Sie die Unterlegscheiben und Muttern anbringen, um das Gehäuse zu sichern (auf der Innenseite des Gehäuses).

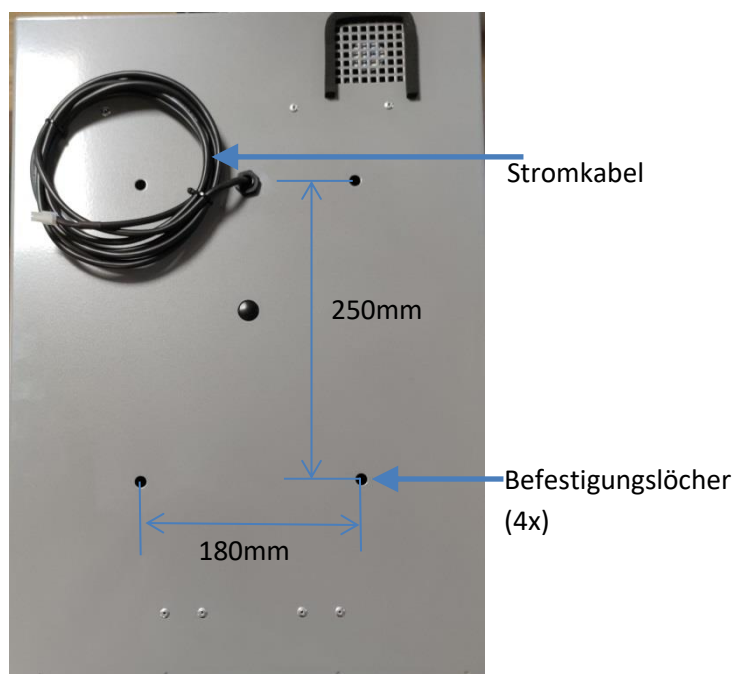

Letzter Schritt: Anbringen von Unterlegscheiben und M8-Muttern auf der Innenseite



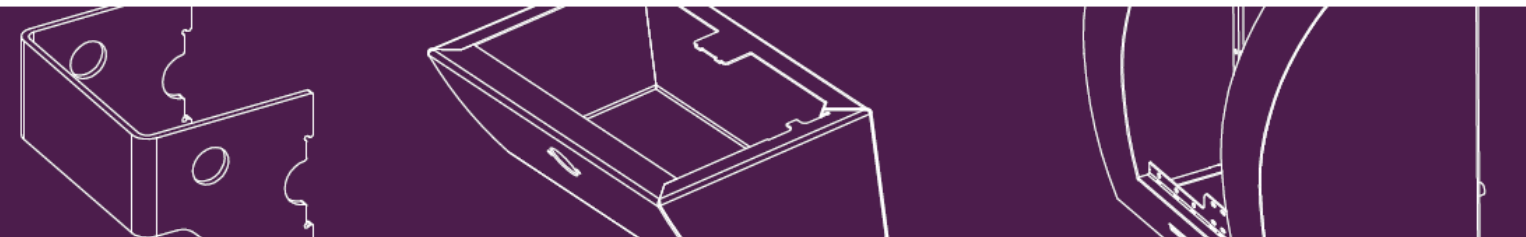

Warnung Wenn die Wand schwach ist, empfehlen wir die Verwendung von Fischer VS 100P. Nachdem die Flüssigkeit in die Löcher eingespritzt wurde, sollten Sie nur noch die Stockschrauben einsetzen. Verwenden Sie die Dübel in diesem Fall nicht wieder. Lesen Sie die Anweisungen auf dem Fischer-Etikett sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass die Löcher nach dem Bohren völlig sauber sind.

Aufhängung an Holz Bohren Sie kleine Löcher von ca. 4 mm Durchmesser in das Holz und schrauben Sie die Gewinde fest in das Holz und befestigen Sie das SixCase wie oben beschrieben. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe zwischen 1,5 und 1,6 m über dem Boden zu bohren.

Operation

Um den Schrank zu schließen, legen Sie beide Hände auf die untere linke und rechte Seite des Schrankes und drücken Sie ihn nach oben. Das Schloss (rechte Seite) gibt dann ein hörbares Klicken von sich, das bestätigt, dass die

der Schrank ordnungsgemäß verschlossen ist.


Im Notfall (Verwendung AED)

- SC1310/SC1330/SC1430: Drücken Sie den roten Knopf (wie auf dem Anweisungsaufkleber angegeben), warten Sie, bis die Halterung ihre unterste Position erreicht hat, und nehmen Sie den AED heraus.
- SC1340/SC1440: Geben Sie den programmierten Code ein, warten Sie, bis die Halterung ihre unterste Position erreicht hat, und nehmen Sie den AED ab (sowohl Code als auch Schlüssel müssen für den Notfall verfügbar sein).

Einstellen der Dauer des Alarms Die Dauer des Alarms kann durch Drehen des Drehknopfes verändert werden (siehe Bilder im Abschnitt "Übersicht SC1330/SC1430"). Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Dauer des intermittierenden Alarms verkürzt. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Dauer erhöht.

Wichtig Es ist zwingend erforderlich, den Code und den Schlüssel für den Notfall immer dabei zu haben (gilt für SC1340/SC1440). Durch einen unerwarteten Defekt kann es vorkommen, dass einer der Öffnungsvorgänge ausfällt. In diesem Fall ist es notwendig, eine Alternative bereitzuhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, die oben genannten Verfahren vor der Lagerung des Defibrillators und regelmäßig nach der Installation des AED zu üben.



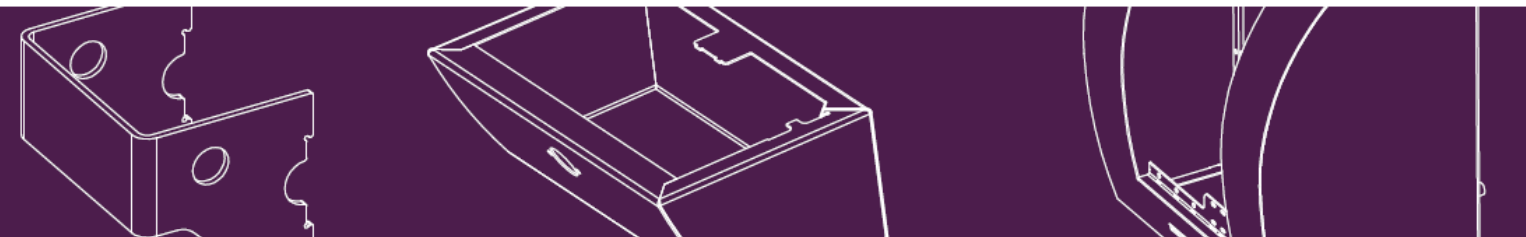


Wartung und Fehlersuche


Wartung Es ist wichtig, den SixCase-Wandschrank **regelmäßig** zu öffnen und zu schließen (empfohlen wird einmal im Monat), um zu prüfen, ob die Verriegelungssysteme und alle elektronischen Teile ordnungsgemäß funktionieren. Achten Sie dabei auf die korrekte Funktion des Druckknopfes, der Codetastatur, der Tastensperre, der Rotorverriegelung und ggf. auf den Status des Defibrillators (siehe Handbuch des AED). Nach festem Druck auf den roten Knopf, dem Einstecken des Schlüssels oder der Eingabe des Codes sollte sich der untere Teil des Gehäuses allmählich und ungehindert nach unten bewegen und so den Zugang zum Defibrillator ermöglichen.

Es ist auch wichtig, den äußeren Zustand des Gehäuses auf eventuelle Schäden zu überprüfen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten. Wenn Sie einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an SixCase. Je nach Art des Defekts kann es ratsam sein, den AED zu entfernen und die Benutzer über den Status (unbrauchbar) zu informieren.

Temperatur (nur für Außenschränke) Wenn Sie Zweifel an der Funktion des elektrischen Heizelements haben (und die Außentemperatur unter 0°C / 32°F liegt), entfernen Sie das AED und wenden Sie sich an Ihren SixCase-Händler. Die Außenschränke sind mit einer aktiven Belüftung ausgestattet. Bei 30°C schaltet sich der Lüfter ein, um warme Luft an der Oberseite auszublasen und kühle Luft an der Unterseite des Gehäuses anzusaugen. Dennoch empfehlen wir, den Schrank in den Schatten zu stellen, um hohe Temperaturen (über 50°C) zu vermeiden.

Auswechseln des Notglases (SC1310/ 1330/ 1430) Die SC1310, SC1330 und SC1430 haben die Möglichkeit, ein Sicherheitsglas einzusetzen. Wenn das Sicherheitsglas eingesetzt ist, zerbricht es, wenn der rote Knopf gedrückt wird. Dies zeigt an, dass der Schrank geöffnet wurde und der AED möglicherweise verwendet wurde. Vor dem Auswechseln des Sicherheitsglases muss die Kabine geschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass alte Glasreste entfernt werden und die Funktion des Schlosses nicht beeinträchtigen. Ziehen Sie den roten Knopf zu sich und setzen Sie das Sicherheitsglas ein. Begleiten Sie den roten Knopf dann ruhig in seine ursprüngliche Position, damit das Glas nicht bricht.

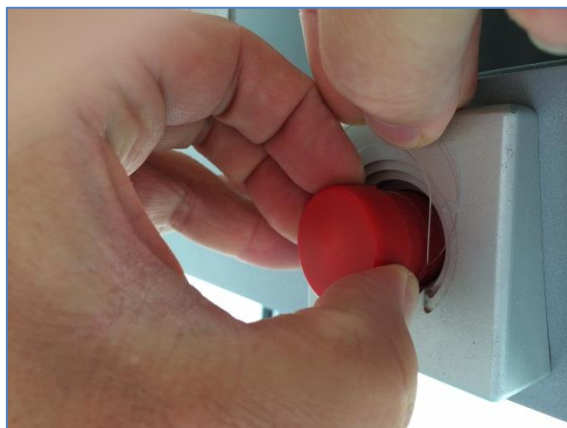

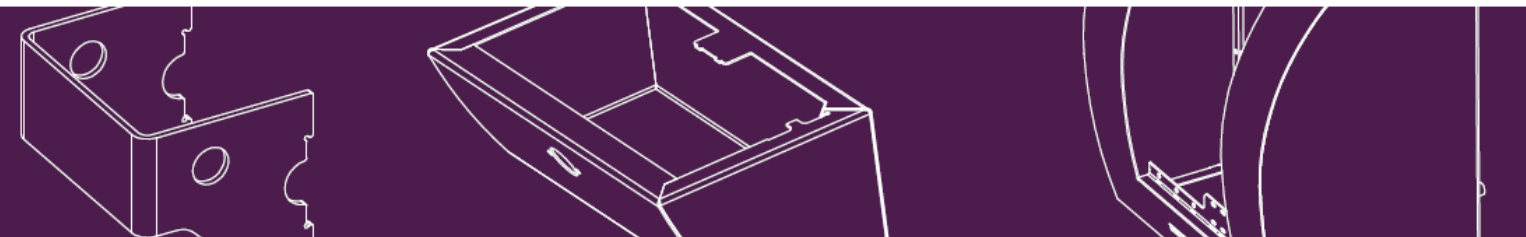
**Ändern des Codes (SC1340/SC1440)** Standardcode für den Zugriff auf das SixCase: 1234

Ändern des CODE:

- Öffnen Sie den SixCase-Schrank mit dem Schlüssel oder dem Standardcode (1234).
- Geben Sie den Code 1245 ein, um den Code zu ändern.
- Geben Sie den neuen Code ein und bestätigen Sie ihn mit dem grünen **V**. Der Alarm meldet den Erfolg mit ein paar Pieptönen.
- Ihr Code wurde geändert.




Wichtig: Bestätigen Sie die Codeänderung immer, indem Sie den SixCase AED-Schrank unter Verwendung des neuen Codes öffnen.

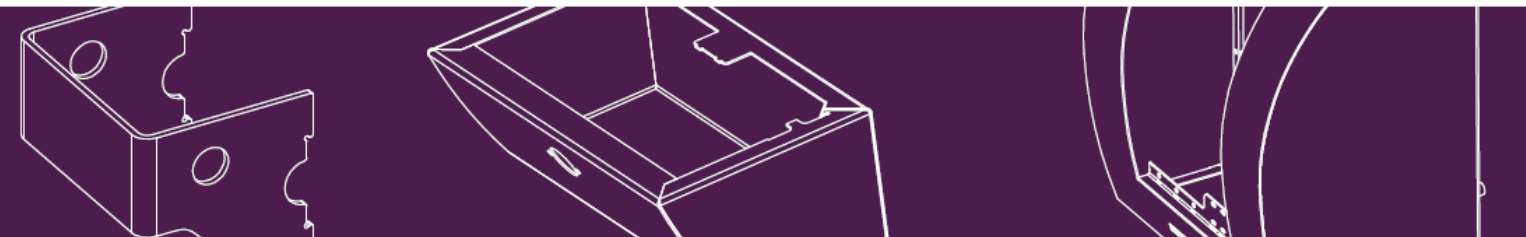


Fehlersuche

Symptom	Abhilfemaßnahmen
Die LED-Beleuchtung funktioniert nicht oder der Alarm funktioniert nicht	- Überprüfen Sie das Netzteil und den Adapter: Die LED am Adapter sollte durchgehend leuchten (eine blinkende oder nicht leuchtende LED weist auf eine Fehlfunktion hin). - Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker richtig angeschlossen sind. (einschließlich der Anschlüsse im Inneren des Gehäuses) - Nur für 1310: Prüfen Sie, ob die 9V-Batterie ersetzt werden muss. Wenn der Schrank weiterhin nicht funktioniert, nehmen Sie ihn außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren SixCase-Händler.
Die Temperatur (Heizung) im Schrank funktioniert nicht richtig (nur bei Außenschränken)	Die Temperatur wird durch Temperatursensoren im Inneren des Schrankes kontrolliert. Die Heizung schaltet sich ein, wenn die Außentemperatur unter 5-10°C liegt, und schaltet sich aus, wenn die Innentemperatur des Schrankes 15-20°C erreicht. Hinweis: Damit die Heizung richtig funktioniert, muss der Schrank geschlossen sein. Wenn der Verdacht besteht, dass das Heizgerät nicht funktioniert: - Öffnen Sie den Schrank. Der Alarm sollte ausgelöst werden. Wenn der Alarm nicht funktioniert, befolgen Sie die Schritte: "LED-Beleuchtung funktioniert nicht oder Alarm funktioniert nicht". - Überprüfen Sie die Funktion der Heizung im Schrank, indem Sie die Schublade, auf der der AED steht, berühren (die Außentemperatur sollte < 0 °C sein). Die Schublade sollte sich wärmer anfühlen als die Außentemperatur. Ist dies nicht der Fall: Nehmen Sie das Gehäuse außer Betrieb, entfernen Sie den AED und wenden Sie sich an Ihren SixCase-Händler. Die Heizung ist ständig eingeschaltet: - den AED entfernen. - Prüfen Sie, ob der Schrank richtig geschlossen ist. Wenn der Schrank offen ist, schließen Sie ihn. Warten Sie 5 Minuten und prüfen Sie, ob die Heizung ausgeschaltet ist. - Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, entfernen Sie den AED, nehmen Sie ihn außer Betrieb, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren SixCase-Händler vor Ort.
Das Schloss lässt sich nicht öffnen, wenn ein programmierter Code verwendet wird	- Programmieren Sie den Code gemäß dieser Anleitung neu - Versuchen Sie, den Schrank mit dem neuen Code zu schließen und zu öffnen

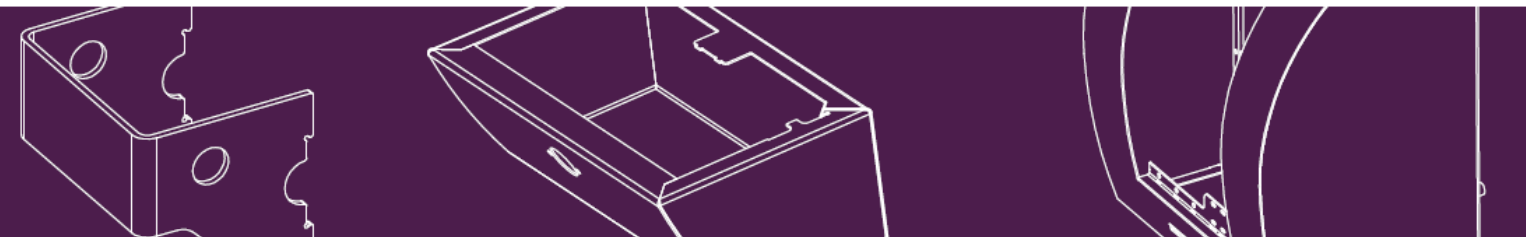


(SC1340/SC1440)	Wenn das Schloss immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren SixCase-Händler.
Pin-Code-Touchpad reagiert nicht auf Eingaben (SC1340/SC1440)	- Überprüfen Sie das Netzteil und den Adapter: Die LED am Adapter sollte durchgehend leuchten (eine blinkende oder nicht leuchtende LED weist auf eine Fehlfunktion hin). - Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse richtig angeschlossen sind. (insbesondere der blaue Touchpad-Anschluss im Inneren des Gehäuses) Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, nehmen Sie es außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler.
Der Schrank schließt nicht richtig	- Schrank manuell oder per Code öffnen - Ziehen Sie den Schlüssel ab (falls Sie ihn zum Öffnen des Schrankes verwendet haben) - Legen Sie beide Hände auf die untere linke und rechte Seite des Gehäuses und drücken Sie es nach oben. - Das Schloss (rechte Seite) muss ein hörbares Klicken von sich geben, um zu bestätigen, dass der Schrank richtig verschlossen ist. Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, nehmen Sie es außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Pin-Code-Touchpad reagiert, aber Gehäuse lässt sich nicht öffnen (SC1340/1440)	- Üben Sie mäßigen Druck auf die untere Halterung aus. Wenn sich das Gehäuse öffnet, versuchen Sie erneut den normalen Vorgang. Sie können dies erreichen, indem Sie einen flachen Schraubendreher zwischen dem unteren und oberen Teil des Gehäuses einführen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies zu einer Beschädigung des Gehäuses führen kann. - Prüfen Sie, ob das Gehäuse verformt ist und der untere Teil des Gehäuses beim Öffnen blockiert wird. Versuchen Sie, die Blockierung zu entfernen Wenn sich der Schrank nicht öffnen lässt, ist möglicherweise das Verschlusssystem defekt, nehmen Sie ihn außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Roter Druckknopf kann betätigt werden, aber der Schrank lässt sich nicht öffnen (SC1310/1330/ SC1430)	- Üben Sie mäßigen Druck auf die untere Halterung aus. Wenn sich das Gehäuse öffnet, versuchen Sie erneut den normalen Vorgang. Sie können dies erreichen, indem Sie einen flachen Schraubendreher zwischen dem unteren und oberen Teil des Gehäuses einführen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies zu einer Beschädigung des Gehäuses führen kann. Wenn sich der Schrank nicht öffnen lässt, ist möglicherweise das

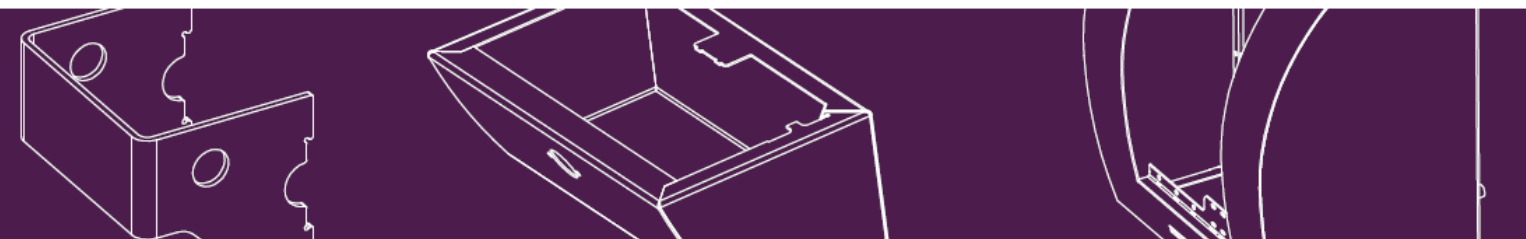

	Verschlussystem defekt, nehmen Sie ihn außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
--	--

Bitte besuchen Sie den Download-Bereich unserer Website www.sixcase.com, um eine Anleitung zum Ausbau der Steuergeräte zu erhalten

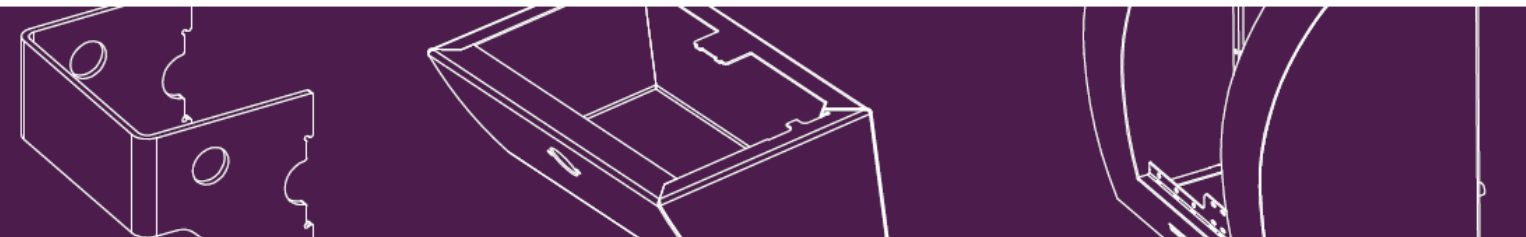

Glossar

AED

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges Gerät für die Erstversorgung im Falle eines Herzstillstands. Es ist wichtig, dass der AED geschützt, gesichert und rund um die Uhr verfügbar ist, um im Notfall sofortige Hilfe leisten zu können.

Bediener/Benutzer

Person, die für den Schrank und den AED verantwortlich ist. Seine/ihre Aufgabe ist es, den Status des AED und des Schrankes zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Betrieb gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien erfolgt.

Online-Dienstleistung

Für weitere Informationen oder Online-Hilfe besuchen Sie bitte unsere Website www.sixcase.com.


Benutzerhandbuch: Das Handbuch enthält alle notwendigen Informationen zur Bedienung des SixCase. Aktualisierungen werden auf unserer Website veröffentlicht.

Haftungsausschluss: GT MEDICARE ist in keiner Weise für die Verfügbarkeit oder Einsatzfähigkeit des im SixCase-Schrank gelagerten AED verantwortlich. GT MEDICARE ist nicht verantwortlich für die Installation, den Gebrauch oder den Einsatz des Schrankes/AED, sowie nicht für den Verlust von Daten, Einkommen, direkt oder indirekt, sowie nicht für Schäden, die Dritten zugefügt werden. Außergewöhnliche Bedingungen, wie z.B. niedrige Temperaturen, defekte Komponenten oder andere externe Faktoren können dazu führen, dass die AEDs nicht einsatzfähig sind. GT MEDICARE behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle damit verbundenen Produkte in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern.



Kontakt

GT Medicare BV
Industrieweg 36A
2382 NW Zoeterwoude
Die Niederlande
T +031 (0) 71 2100 220
[E info@sixcase.com](mailto:info@sixcase.com)

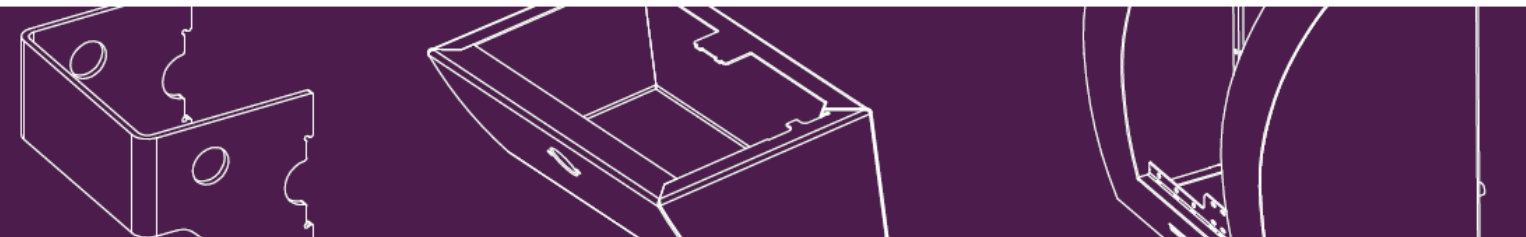

Anhang A: Technische Spezifikationen


Technische Spezifikation

Typ	SC1330 / SC1340 (Outdoor-Schränke)
Gewicht	12 kg
Abmessungen	56(H)x40(B)x26(T)cm
Stoßsicher	IEC61439-5 Abschnitt 10.2.101.2/3
Wasserdicht	IP54
Kühlung	Aktive Belüftung
Heizung	Elektrisch bis zu -15 °C Außentemperatur
Korrosionsbeständig	Aluminium mit Beschichtung
Fenster	Schlagfestes Polycarbonat
Einbausatz	Gekapselt (Holz & Stein)
Stromversorgung	24V Transformator (enthalten)
Öffnung	SC1330: Türknauf SC1340: 4-stelliger Code Touchpad (Sicherung mit Schlüssel)
Beleuchtung	LED rot und blau
Akustischer Alarm	+/- 95dB intermittierend

Typ	SC1430 / SC1440 (Outdoor-Schränke)
Gewicht	15 kg
Abmessungen	56(H)x40(B)x26(T)cm
Stoßsicher	IEC61439-5 Abschnitt 10.2.101.2/3
Wasserdicht	IP54
Kühlung	Aktive Belüftung
Heizung	Elektrisch bis zu -15 °C Außentemperatur
Korrosionsbeständig	Rostfreier Stahl mit Beschichtung
Fenster	Schlagfestes Polycarbonat
Einbausatz	Gekapselt (Holz & Stein)
Stromversorgung	24V Transformator (enthalten)
Öffnung	SC1430: Roter Druckknopf SC1440: 4-stelliger Code Touchpad (Sicherung mit Schlüssel)
Beleuchtung	LED rot und blau
Akustischer Alarm	+/- 95dB intermittierend

Anmerkungen:

1. Die Polar-Versionen (optional) der Außenschränke verfügen über zusätzliche Heizkapazität und Isolierung, die den AED bis zu einer Außentemperatur von -30°C schützen
2. Der Schrank SC1340 verfügt über eine Option für ein 4-stelliges mechanisches Codeschloss als Reserveschloss

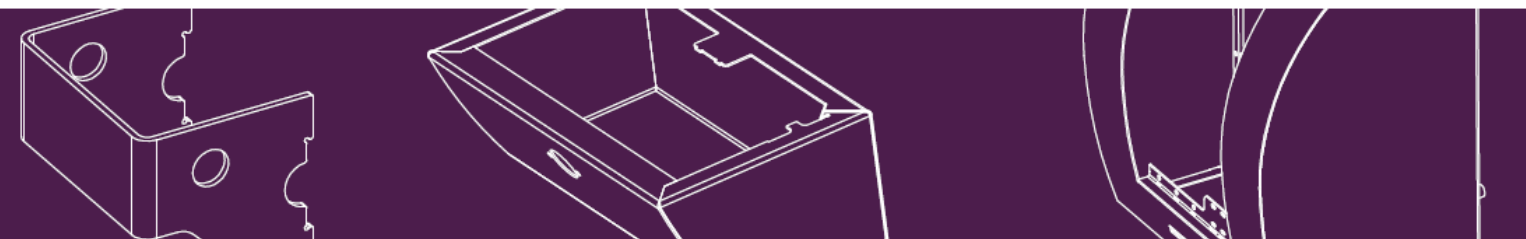

Technische Spezifikation (Fortsetzung)

Typ	SC1310 (Innengehäuse)
Gewicht	12 kg
Abmessungen	56(H)x40(B)x26(T)cm
Stoßsicher	IEC61439-5 Abschnitt 10.2.101.2/3
Wasserdicht	IP54
Kühlung	-
Heizung	-
Korrosionsbeständig	Aluminium mit Beschichtung
Fenster	Schlagfestes Polycarbonat
Einbausatz	Gekapselt (Holz & Stein)
Stromversorgung	9V-Batterie
Öffnung	Roter Druckknopf
Beleuchtung	LED rot, wenn geöffnet
Akustischer Alarm	+/- 95dB intermittierend